

HY40R Συσκευή με Τεχνολογία Μικρορεύματος για Βελτίωση του Ύπνου και Άμεση Χαλάρωση – Εγχειρίδιο Χρήσης



Περιγραφή Συσκευής

Η HY40 είναι φορητή, επαναφορτιζόμενη συσκευή μικρορεύματος, σχεδιασμένη για χρήση χαλάρωσης μέσω παλμικής διέγερσης στην παλάμη.

Διαθέτει 2 λειτουργίες (Sleep / Excite), 15 επίπεδα έντασης, ψηφιακή οθόνη LED και φόρτιση μέσω USB.

Χειρισμός & Πλήκτρα

Κουμπί M: Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Σύντομο πάτημα για εναλλαγή λειτουργίας.

Κουμπί + / - : Ρύθμιση έντασης από 1 έως 15 επίπεδα.

Οθόνη LED: Εμφάνιση επιπέδου έντασης, λειτουργίας και ένδειξης μπαταρίας.

Τρόπος Χρήσης

1. Φορτίστε πλήρως πριν την πρώτη χρήση.
2. Κρατήστε τη συσκευή στην παλάμη ώστε να υπάρχει πλήρης επαφή με τους μεταλλικούς δακτυλίους.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε λειτουργία.
4. Ξεκινήστε από χαμηλή ένταση και προσαρμόστε σταδιακά.
5. Προτεινόμενη διάρκεια χρήσης: 10-30 λεπτά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Μοντέλο: HY40
- Υλικό: ABS + Ανοξείδωτος χάλυβας
- Ενσωματωμένη μπαταρία: 300mAh
- Τάση φόρτισης: DC 5.0V / 1A
- Τάση λειτουργίας: 3.7V
- Ρεύμα λειτουργίας: 0.005A
- Ονομαστική ισχύς: 0.03W
- Διάρκεια λειτουργίας: έως 2 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: περίπου 1 ώρα

Προειδοποιήσεις

- Μην χρησιμοποιείτε εάν έχετε εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές (π.χ. βηματοδότη).
- Μην χρησιμοποιείτε κατά τη φόρτιση.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
- Διακόψτε τη χρήση εάν παρουσιαστεί ενόχληση.
- Κατάλληλη για ενήλικες.

Αποποίηση Ευθύνης

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση χαλάρωσης και ευεξίας. Δεν αποτελεί ιατρικό προϊόν και δεν αντικαθιστά ιατρική διάγνωση ή θεραπεία.

Απορρίψη Συσκευής

Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παραδώστε το σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Δήλωση Συμμόρφωσης (CE)

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ασφάλειας χαμηλής τάσης.

Συμμόρφωση RoHS

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS (Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών).